

# ALPHA madras

Tryksårsforebyggende skummadras op til sårstadie 2



## Primær anvendelse

Kommuner  
Institutioner  
Hospitaller

Alpha skummadras fra Winnocare Nordic anvendes primært til brugere med risiko for tryksår op til stadie 2.

## Alpha skummadras vælges fordi den er:

- Udført med en blød profileret trykaflastende viskoelastisk skum, der sikrer optimal liggekomfort for brugeren.
- God til at transpirere fugtighed fra kroppen væk med udgangspunkt i den viskoelastiske profilerede skum kombineret med Dahlia betræk.
- Beregnet til senge med indstillelig sengebund
- Velegnet til brugere med risiko for udvikling af tryksår

## Hertil kommer at Alpha skummadras er forsynet med:

- Åndbart inkontinensbetræk – Dahlia betræk, som er strækbart i flere retninger
- Betræk som er allergivenligt og brandhæmmende
- Mulighed for forlængerstykker på henholdsvis 10, 15 eller 20 cm

## Alpha skummadras er opbygget af:

- 9 cm HR- eller RP-skum i bunden
- 5 cm viskoelastisk profileret skum på toppen.


Begge skumtyper i høj kvalitet.

Brugeren får ved anvendelse af Alpha skummadrasen en god følelse af, at kroppen bliver støttet, samtidig med at madrassen yder en forebyggende trykaflastende effekt. Takket være hybridskummen kan madrassen nemt rulles sammen.


## Åndbart betræk:

Alpha skummadras er forsynet med åndbart inkontinens Dahlia betræk, som er strækbart i flere retninger. Dahlia betrækket er:

- Svejst og ikke syet sammen
- Tæt i forhold til indtrængning af urin, blod eller lignende væsker
- Forsynet med 2 håndtag på hver side til håndtering af madrassen
- Lynlås på 3 sider
- Nemt at af og påmontere på grund af en tricot, som madrassen er forsynet med

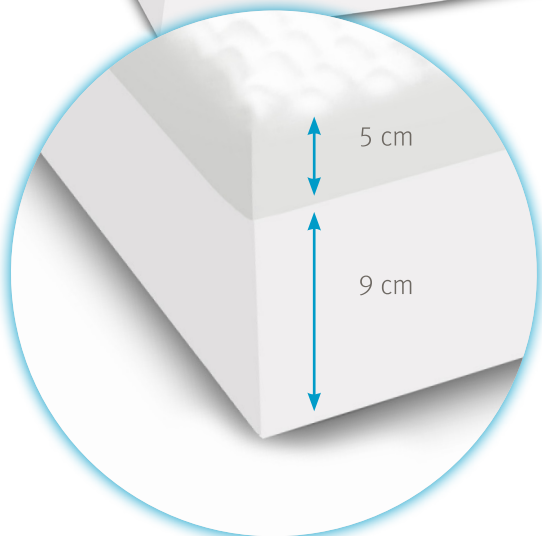

 ergolet®

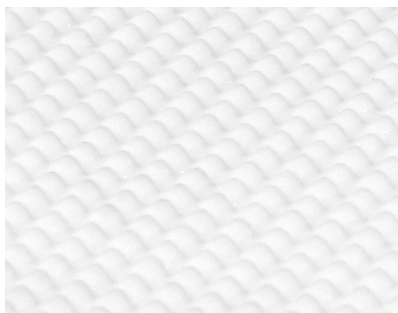

Profileringen af det viskoelastiskskum er vaflet som en æggebakke.



Inkontinensbetræk, som sikrer, at væsker som f. eks. urin og blod ikke trænger igennem. Der er 4 håndtag - 2 på hver side. Betrækket er svejst ved lynlåsene. Det er vaskbart ved 90 grader og kan autoklaveres.



#### Rengøringsmetode:

Som udgangspunkt kræver madrassen ikke rengøring, idet den er monteret med et åndbart betræk med væskebarriere. Skulle der være behov for, at madrassen skal rengøres kan madrassen rengøres med alm. vand og sæbe.

Madrassen tåler desinficering med Ethanol 70 %. Man skal dog være opmærksom på, at den skal tørres efter med vand.

Madrassen må ikke gennemvædes, idet det øger risikoen for at beskadige skummet.

Når madrassen er fugtig, må den ikke udsættes for tryk (fra f.eks. betræk) eller andre belastninger under rens/vask/tørring, idet dette kan medvirke til at beskadige skummet og deformere madrassen.


Øvrige rengøringsmidler med alkohol og blegemidler kan være skadelig for madras og betræk.

| Version                           | Mål                    | HMI-nr     | Varenummer |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|
| Alpha skummadras (HR-VE)          | 83 cm x 200 cm x 14 cm | 79885      | 023-00004  |
| Alpha skummadras (HR-VE)          | 88 cm x 200 cm x 14 cm | 79886      | 023-00005  |
| Alpha skummadras (RP-VE)          | 83 cm x 200 cm x 14 cm | 119723     | 023-00221  |
| Alpha skummadras (RP-VE)          | 88 cm x 200 cm x 14 cm | 119729     | 023-00222  |
| Tilbehør                          | Mål                    | Varenummer |            |
| Madrasforlænger                   | 83 cm x 10 cm x 14 cm  | 023-00012  |            |
| Madrasforlænger                   | 88 cm x 10 cm x 14 cm  | 023-00014  |            |
| Madrasforlænger                   | 83 cm x 15 cm x 14 cm  | 023-00006  |            |
| Madrasforlænger                   | 88 cm x 15 cm x 14 cm  | 023-00007  |            |
| Madrasforlænger                   | 83 cm x 20 cm x 14 cm  | 023-00013  |            |
| Madrasforlænger                   | 88 cm x 20 cm x 14 cm  | 023-00015  |            |
| Dahlia betræk til madras          | 83 cm x 200 cm x 14 cm | 023-00008  |            |
| Dahlia betræk til madras          | 88 cm x 200 cm x 14 cm | 023-00009  |            |
| Dahlia betræk til madrasforlænger | 83 cm x 200 cm x 10 cm | 023-00016  |            |
| Dahlia betræk til madrasforlænger | 83 cm x 200 cm x 15 cm | 023-00010  |            |
| Dahlia betræk til madrasforlænger | 83 cm x 200 cm x 20 cm | 023-00017  |            |
| Dahlia betræk til madrasforlænger | 88 cm x 200 cm x 10 cm | 023-00030  |            |
| Dahlia betræk til madrasforlænger | 88 cm x 200 cm x 15 cm | 023-00011  |            |
| Dahlia betræk til madrasforlænger | 88 cm x 200 cm x 20 cm | 023-00029  |            |

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                    |   |
|--------------------|---|
| Min. brugervægt    | 30 kg   |
| Max brugervægt     | 150 kg  |
| Bredde Alpha 83 cm | 830 mm  |
| Bredde Alpha 85 cm | 850 mm  |
| Bredde Alpha 88 cm | 880 mm  |
| Længde             | 2000 mm   |
| Højde              | 140 mm  |
| Vægt Alpha 83 cm   | 10,3 kg   |
| Vægt Alpha 85 cm   | 10,5 kg   |
| Vægt Alpha 88 cm   | 10,8 kg   |
| Rumvægt:           |   |
| RP-skum            | 38 kg/m <sup>3</sup> , indtrykshårdhed 150 Newton |
| HR-skum            | 36 kg/m <sup>3</sup> , indtrykshårdhed 150 Newton |
| VE-skum            | 48 kg/m <sup>3</sup> , indtrykshårdhed 100 Newton |
| Forventet levetid  | 5 år  |

Udformningen fra enden

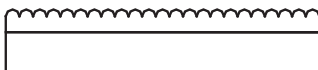

Udformningen fra siden



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende, og kan ændre sig i forskellige situationer. WinnCare Nordic forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Kontakt WinnCare Nordic, hvis du har spørgsmål til dette materiale.



date 07.09.2020 - ver. 8

WinnCare Nordic ApS  
Tårnbergvej 12C  
4220 Korsør  
Danmark  
tlf. +45 70 27 37 20  
e-mail: info@winnCare.dk

[www.winnCare.dk](http://www.winnCare.dk)

**WINN**CARE  
N o r d i c