

# FIXIER- UND HALTE- GURTVORRICHTUNGEN FÜR STÜHLE

Die auf ärztliche Verschreibung gelieferten Fixiervorrichtungen für Stühle von WINN'SAVE® wurden speziell dafür entwickelt, die Bewegungsfreiheit von psychisch beeinträchtigten Personen zu begrenzen, um Sturzgefahren zu vermeiden bzw. vorzubeugen, die Zeit rastlosen Umherwandels zu begrenzen oder pflegerische Maßnahmen zu ermöglichen.

- **Wirksamkeit:** je nach erforderlicher Schutzstufe erweiterungsfähiges Konzept.  
Angenehmer, im Griff weicher Stoff.  
Erleichterte Anwendung durch integrierte Markierungen.  
Verstärkung der auf Zug belasteten Nähte.  
Langlebige Materialien (rostfreie Schnallen und Ösen)
- **Sicherheit:** "feuerhemmend" behandelte Stoffe.  
Kompatibilität mit thermischer und chemischer Desinfektion.  
Zwei Verschluss-Systeme nach Bedarf (Fixierung - magnetisch oder Haltefunktion – Schlaufe - )



### • Bauch- und Schrittgurt

**Indikation:** Haltungsschwäche und Rutschen nach vorne.

**Eigenschaften:** Fixierung des Sitzenden im Rollstuhl oder Ruhesessel.

**Gebrauchshinweise:** Den Taillenumfang messen und die Maße des geeigneten Gurts auswählen.

**Zusammensetzung:** Material feuerschutzbehandeltes Polyester.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.



### • Thorax-Gurt zur Fixierung im Stuhl

**Indikation:** Haltungsschwäche.

**Eigenschaften:** Fixierung des Sitzenden im Rollstuhl oder Ruhesessel.

**Gebrauchshinweise:** Mit dem vorderen Befestigungspunkt beginnen, anschließend Befestigung hinten vornehmen.

**Zusammensetzung:** Material feuerschutzbehandeltes Polyester.

Erhältlich in Einheitsgröße.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.



### • Weste mit Schrittgurt (oder sog. "Vollgurt")

**Indikation:** Haltungsschwäche und Rutschen nach vorne.

**Eigenschaften:** Fixierung des Sitzenden im Rollstuhl oder Ruhesessel.

**Gebrauchshinweise:** Prüfen, dass Statur der fixierten Person und Eigenschaften des Vollgurts zusammenpassen

**Zusammensetzung:** Material feuerschutzbehandeltes Polyester.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut abzuwägen.



### • Einfacher T-förmiger Abdominal-Haltegurt

**Indikation:** Haltungsschwäche und Rutschen nach vorn

**Eigenschaften:** Fixierung des Sitzenden im Rollstuhl oder Ruhesessel.

**Gebrauchshinweise:** Halben Taillenumfang messen (von Seite zu Seite).

**Zusammensetzung:** Material feuerschutzbehandeltes Polyester.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE*	VERSCHLUSS-SYSTEME	
			MAGNETISCH	VERSTELLBARE SCHLAUFE
VCBTFT005-00	Option Thorax-Gurt für Fixierung	Einheitsgr. (U)	-	-
VCBTFT005-10	Bauch- und Beckenfixierung - (S)	45 - 85 cm	x	
VCBTFT005-20	Bauch- und Beckenfixierung - (M)	70 - 118 cm	x	
VCBTFT005-30	Bauch- und Beckenfixierung - (L)	94 - 158 cm	x	
VCNTFT008-10	Weste mit Schrittgurt - (S)	50 - 80 cm		x
VCNTFT008-20	Weste mit Schrittgurt - (M)	70 - 100 cm		x
VCNTFT008-30	Weste mit Schrittgurt - (L)	90 - 130 cm		x
VNCTFT012-10	T-förmiger Abdominal-Haltegurt - (S)	50 - 80 cm		x
VNCTFT012-20	T-förmiger Abdominal-Haltegurt - (M)	70 - 100 cm		x
VNCTFT012-30	T-förmiger Abdominal-Haltegurt - (L)	90 - 130 cm		x



\* Maß entsprechend Taillenumfang (min./max.)

1 Jahr Garantie

Pflege:



**ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare** – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich  
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail: [contact@askle.com](mailto:contact@askle.com)

[www.winnicare.fr](http://www.winnicare.fr)



**WINCARE**  
g r o u p e

by

**ASKLÉSANTÉ**