


DISPOSITIVI DI CONTENZIONE E MANTENIMENTO DELLE PERSONE NELLE POLTRONE

I dispositivi di contenzione alla poltrona WINN'SAVE®, forniti dietro prescrizione medica, sono stati appositamente progettati per limitare la libertà di movimento delle persone con facoltà psichiatriche alterate al fine di impedire il rischio di caduta, limitare i periodi di deambulazione o permettere la somministrazione di un trattamento.

- **Efficacia:** Progettazione evolutiva a seconda del livello di protezione atteso.
Tessuto rassicurante grazie a una percezione morbida al tatto.
Uso facilitato grazie a marcature integrate.
Rinforzo delle cuciture sottoposte alle trazioni.
Durabilità dei materiali (Fibbie e occhielli inossidabili)
- **Sicurezza:** Tessuti trattati «Fuoco Ritardante».
Compatibilità con una disinfezione termica e chimica.
Due sistemi di chiusura a seconda delle necessità (Contenzione – magnetica o mantenimento – fibbia).

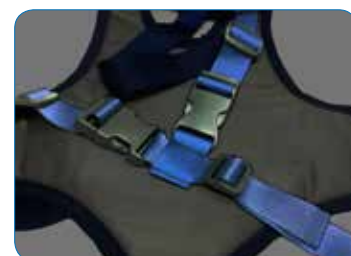

Contenzione e mantenimento nella poltrona

• Contenzione addominale e mantenimento pelvico

Indicazioni: Instabilità posturale e scivolamento in avanti.

Proprietà: Contenzione della persona seduta in una sedia a rotelle o da riposo.

Consigli per l'uso: Misurare il girovita e scegliere la dimensione della cintura appropriata.

Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco.

Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



• Cinghia toracica per contenzione in una poltrona

Indicazioni: Instabilità posturale.

Proprietà: Contenzione della persona seduta in una sedia a rotelle o da riposo.

Consigli per l'uso: Iniziare dal punto di fissaggio anteriore quindi eseguire il fissaggio posteriore.

Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco.

Disponibile in taglia unica.

Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



• Giubbotto con mantenimento pelvico (o detto «body integrale»)

Indicazioni: Instabilità posturale e scivolamento in avanti.

Proprietà: Contenzione della persona seduta in una sedia a rotelle o da riposo.

Consigli per l'uso: Verificare il corretto adeguamento tra la morfologia della persona e le caratteristiche del «body integrale».

Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco.

Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



• Mantenimento addominale semplice a forma di T

Indicazioni: Instabilità posturale e scivolamento in avanti.

Proprietà: Contenzione della persona seduta in una sedia a rotelle o da riposo.

Consigli per l'uso: Misurare il mezzo girovita (la parte fianco a fianco).

Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco.

Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



RIF.	DESCRIZIONE	MISURE*	SISTEMI DI CHIUSURA	
			MAGNETICA	FIBBIA SCORREVOLE
VCBTFT005-00	Opzione Imbracatura toracica per contenzione	Unica (U)	-	-
VCBTFT005-10	Contenzione addominale e pelvica - (S)	45 - 85 cm	x	
VCBTFT005-20	Contenzione addominale e pelvica - (M)	70 - 118 cm	X	
VCBTFT005-30	Contenzione addominale e pelvica - (L)	94 - 158 cm	X	
VCNTFT008-10	Giubbotto con mantenimento pelvico - (S)	50 - 80 cm		X
VCNTFT008-20	Giubbotto con mantenimento pelvico - (M)	70 - 100 cm		X
VCNTFT008-30	Giubbotto con mantenimento pelvico - (L)	90 - 130 cm		X
VNCTFT012-10	Mantenimento addominale a forma di T - (S)	50 - 80 cm		X
VNCTFT012-20	Mantenimento addominale a forma di T - (M)	70 - 100 cm		X
VNCTFT012-30	Mantenimento addominale a forma di T - (L)	90 - 130 cm		X

*Misura corrispondente al girovita (min/max)

Garanzia 1 anno

Manutenzione: 95° CL s5000ppm



ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 - Francia
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail: contact@askle.com

www.winnicare.fr



WINCARE
g r o u p e
by
ASKLÉSANTÉ