

GUÍA RÁPIDA TRITON/DUAL

Silla de aseo y ducha (peso máx. usuario 150 kg)

ARRIBA



INCLINACIÓN HACIA DELANTE

Regule la inclinación del asiento hasta +7°

ABAJO



INCLINACIÓN HACIA ATRÁS

Regule la inclinación del asiento hasta -30°

TRANSPORTE



Posición de la silla para transportar al usuario con seguridad

SEGURIDAD



AJUSTE la silla a la posición deseada
PULSE S+1 o S+2 durante 2 segundos.

Cuando oiga un **PITIDO**, la posición deseada se habrá guardado en el botón de memoria 1 o 2

1

MEMORIA 1

Consulte en las instrucciones el apartado "SEGURIDAD"

2

MEMORIA 2

Consulte en las instrucciones el apartado "SEGURIDAD"



TRITON/DUAL

WIN CARE



UN CONSEJO:

Utilice las funciones de memoria para guardar posiciones concretas para lavarse el pelo, ir al baño

PARADA & BAJADA DE EMERGENCIA (complemento adicional)

Si desea la parada y bajada de emergencia como complemento, están disponibles en fábrica.

● PARADA DE EMERGENCIA

Púlselo para bloquear.
Gírelo para reiniciar.

● DESCENSO DE EMERGENCIA

Se puede utilizar para bajar la silla, por ejemplo, en caso de que el mando no funcione.

BATERÍA

Hasta 100 ciclos por carga.
Debe cargarse con regularidad, por ejemplo, por la noche.



Zumbido de la batería de bajo voltaje.

INDICADOR LED

- **AMARILLO** Cargando.
- **SIN LUZ** Carga completa.

HMI: 109902



WIN CARE

TRITON/DUAL